

ISTRUZIONI PER ESEGUIRE IL TAMPONE BUCCALE CON SISTEMA DI ESSICCAMENTO

Utilizzando guanti monouso, strofinare il tampone per 60 secondi tra la guancia e la gengiva superiore, prestando attenzione a non toccare o in alcun modo contaminare la parte del tampone destinata al prelievo.



Reinserire il tampone nel tubo sterile, che può essere conservato e trasportato a temperatura ambiente.

AVVERTENZE:

- Effettuare il tampone almeno 2 ore dopo che il cane abbia mangiato o bevuto
- Tenere separati per almeno 2 ore cani coabitanti, prima di effettuare il prelievo